

TwinShoe - Balancesko Til Højdejustering



Indikationer

- Højdejustering ved samtidig brug af anden behandlersko

Tilbehør

Tåkappe kan tilkøbes, så TwinShoe kan lukkes i tåen. Se referencenumre under sortiment.

Produktinfo

TwinShoe er specielt udviklet til højdejustering ved samtidig brug af andet terapifodtøj for at modvirke kompensationskader og sikre en fysiologisk korrekt gang.

TwinShoe er åben i tåen, en tåkappe kan tilkøbes, så den kan lukkes. TwinShoe er 3,6 cm høj.

TwinShoe kan anvendes sammen med følgende af vores behandlersko:

- OrthoWedge
- HeelWedge
- Wound Care Shoe

Du finder information om skoene under relaterede produkter herunder eller under menupunktet Trykaflastningssko og såler.

Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostrøpper
- Sæt foden ind i den åbne sko
- Kontroller, at foden er korrekt placeret i skoen og at hælen er så langt tilbage i skoen som muligt
- Luk skoen med velcrostrøpperne
- Foden må ikke sidde for fast, men heller ikke for løst i skoen

Vaskeanvisning

- TwinShoe kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: TwinShoe kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften
- TwinShoe må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
XS (33,5-37)	TwinShoe	1 stk	TS0B
S (37,5-39,5)	TwinShoe	1 stk	TS1B
M (40-41)	TwinShoe	1 stk	TS2B
L (42-44)	TwinShoe	1 stk	TS3B
XL (44,5-47)	TwinShoe	1 stk	TS4B