



Indikationer

- Overfladiske sår
- Inficerede sår
- Kroniske sår
- Akutte sår

Produktinfo

Revamil netforbinding er imprægneret med 100% ren, medicinsk honning.

Den fleksible polyacetat netforbinding klæber ikke til såret og garanterer en langsom afgivelse af honning i sårområdet. En netforbinding er til engangsbrug og rækker til én behandling.

Revamils hydrofile egenskaber sikrer et fugtigt sårmiljø, som i kombination med honningens høje enzymaktivitet fremmer sårheling. Revamil er særdeles velegnet til behandling af akutte, kroniske og inficerede sår i alle sårfaser. Revamil er let at påføre, hænger ikke fast i såret og neutraliserer sårlugt.

Alle vores Revamil medicinsk honning produkter er baseret på honning, der udvindes i Holland fra sunde bifarme under kontrollerede forhold i væksthuse. Det betyder, at honningen **ikke** indeholder sprøjtegift, hormoner, bakteriesporer, pollenrester eller andre skadelige stoffer.

Brugervejledning

- Rens og debrider såret efter behov
- Applicer Revamil netforbindingen over såret
- Netforbindingen dækkes med en sekundær bandage efter sårets behov
- Fjern Revamil netforbindingen og gentag behandlingen efter behov med maks 3 dages interval

Sortiment

Højnæsgaard | Gøngehusvej 252 | 2950 Vedbæk | Tlf. 4589 0225 | Fax 4589 0229 | info@axel-madsen.dk

5 x 5 cm, 10 stk. i æske	10 stk	1 æske	10307
8 x 8 cm, 7 stk. i æske	7 stk	1 æske	10300
10 x 10 cm, 10 stk. i æske	10 stk	1 æske	10302
10 x 20 cm, 5 stk. i æske	5 stk	1 æske	10305