



## Indikationer

- Lindrer ømhed i muskler og sener
- Forbedrer ydeevnen ved kontinuerlig stimulering
- Stimulerer blodcirkulationen og lymfecirkulationen

## Produktinfo

Mecron kinesiologi tape er en elastisk tape specielt udviklet til sport og til kinesiologisk behandling. Mecron kinesiologi tape er vandfast, meget holdbar og kan blive på huden i flere dage. Tapen er strækbar op til 30%.

Mecron kinesiologi tape anvendes i behandling af muskel-, facia- og senesyntomer og forbedrer ydeevnen ved hjælp af kontinuerlig receptorstimulering. Den naturlige helbredende proces er forbedret som følge af forbedret cirkulation i det tapede område.

Mecron kinesiologi tape er 5 cm x 5 m og kan købes i 5 farver.

## Brugervejledning

- Huden skal være ren (vasket med varmt vand og sæbe) og tør, når tapen sættes på
- Tapen sættes løst på
- Sørg for at enderne er fastsat uden at de er spændte
- Vær sikker på, at patienten har en korrekt kropsholdning, når tapen sættes på
- Fastgør tapen med ydersiden af tommelfingeren, og sørg for, at tapen ikke buer eller er krøllet
- Undgå at berøre limlaget for at forhindre fjernelse af klæbemidlet
- Efter fastgørelse af tapen, gnid på tapen for at aktivere limen. Sørg for at gnide langs båndets længde
- Når du fjerner tapen, hold fast i den omgivende hud med hånden. Dette reducerer patientens smerter og beskytter huden mod irritation

## Sortiment

<b>Størrelse</b>	<b>Indhold</b>	<b>Pakning</b>	<b>Ref. nr.</b>
5 cm x 5 m, SORT	1 rulle	1 stk	DKT-S
5 cm x 5 m, BLÅ	1 rulle	1 stk	DKT-B
5 cm x 5 m, BEIGE	1 rulle	1 stk	DKT-H
5 cm x 5 m, RØD	1 rulle	1 stk	DKT-R
5 cm x 5 m, GUL	1 rulle	1 stk	DKT-G