

# Toe Alignment Splint Til Tåkorrigering



## Indikationer

- Post-operativt, f.eks. ved Hallux Valgus, Digitus Malleus (Hammer tæer) og Tailors Bunion

## Produktinfo

Toe Alignment Splint (TAS) er en støttebandage udviklet med henblik på at optimere helingsprocessen efter operation og fastholde korrektion af tåstilling. Toe Alignment Splint er fremstillet af elastisk bomulds materiale og består af et mellemfodsbånd, et hælbånd og 4 tåstropper, der kan tilpasses alle fodstørrelser ved hjælp af velcrostropper.

Et tyndt elastisk mellemfodsbånd reducerer skridning og bløde tåstropper holder tæerne i den korrekte position for at opretholde justeringen efter kirurgi af hallux valgus, hammer tæer eller Tailors Bunion. Kan bæres under en strømpe. Toe Alignment Splint er latexfri.

## Brugervejledning

### Digitus Malleus (Hammer tæer)

- Fastgør mellemfodsbåndet rundt om foden, og tåstroppen rundt om tåen
- Hælbåndet fastgøres, der forhindrer at bandagen skrider

### Tailors Bunion

- Fastgør mellemfodsbåndet rundt om foden, og tåstroppen rundt om lilletåen
- Hvis det er nødvendigt, kan det smalle tåbånd fastgøres med en velcrostrop til mellemfodsbåndet

### Hallux Valgus

- Fastgør mellemfodsbåndet rundt om foden

- Den store tåløkke fastgøres
- Stabiliseringselementet fastgøres på siden af den store tåløkke med en velcrostrop

## Vaskeanvisning

- Kan vaskes ved 30 grader
- Skal lufttørre

## Sortiment

<b>Størrelse</b>	<b>Indhold</b>	<b>Pakning</b>	<b>Ref. nr.</b>
One size	Toe Alignment Splint	1 stk.	TAS