



# Wound Care Shoe - Postoperativt Til Diabetespatienter, Sårsko



## Indikationer

- Trykaflastning
- Forebyggende og behandling af diabetiske fodsår
- Heler åbne sår og belastede ulcus og absces
- Postoperativ fase efter operationer på tæer- og/eller forfoden

## Tilbehør

Der medfølger 4 såler af forskellig hårdhedsgrad, som kan tilpasses/-skæres individuelt. Sålerne lægges i skoen i forskellig rækkefølge alt efter behov. Der medfølger anvisning for tilskæring.

Nye såler kan tilkøbes, hvis der bliver behov for tilretning i behandlingsforløbet (se referencenumre under sortiment).

## Produktinfo

Wound Care Shoe (WCS) er en åben bandagesko velegnet til forebyggelse og behandling af fodsår og aflastning. Wound Care Shoe er specielt velegnet til langtidsanvendelse.

Skoen er af læder, indeni er der perforerede områder, som gør det muligt at tilpasse skoen individuelt. Der medfølger derudover 4 såler af forskellig hårdhedsgrad, som kan tilpasses/-skæres individuelt. Sålerne lægges i skoen i forskellig rækkefølge alt efter behov. Med skoen følger der anvisning for tilskæring. Nye såler kan tilkøbes, hvis der bliver behov for tilretning i behandlingsforløbet.

Det anbefales at anvende en TwinShoe, højdeudligningssko, til den anden fod for at forebygge kompensationskader. Du finder TwinShoe under relaterede produkter herunder eller under menupunktet Trykaflastningssko og såler.

## Brugervejledning

- Wound Care Shoe langtidsforbindingsshoen fås til henholdsvis venstre og højre fod. Det er meget vigtigt, at skoen har den rigtige størrelse for at kunne fungere korrekt
- Indvendigt på sålen er der et "D", som bør være placeret distalt lige inden den første mellemfodsknogle. På den måde sikres det, at trykpunktet på fodens sål ligger distalt mod mellemfodsknogle
- Velcrostropperne sørger for, at Wound Care Shoe hurtigt og nemt kan åbnes og lukkes
- Foden må ikke sidde for fast, men heller ikke for løst i skoen
- Der medfølger 4 såler af forskellig hårshedsgrad, som kan tilpasses/-skæres individuelt. Sålerne lægges i skoen i forskellig rækkefølge alt efter behov. Der medfølger anvisning for tilskæring og brug af sålerne. Nye såler kan tilkøbes, hvis der bliver behov for tilretning i behandlingsforløbet

## Vaskeanvisning

Wound Care Shoe kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste. Håndvask: Wound Care Shoe kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften. Wound Care Shoe må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur. De medfølgende såler kan vaskes med lunkent vand og sæbe eller et desinfektionsmiddel.

## Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
XS (37-38), VENSTRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS1B/L
XS (37-38), HØJRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS1B/R
S (39-40), VENSTRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS7B/L
S (39-40), HØJRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS7B/R
M (41-42), VENSTRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS2B/L
M (41-42), HØJRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS2B/R
L (43-44), VENSTRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS3B/L
L (43-44), HØJRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS3B/R
XL (45-46), VENSTRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS4B/L
XL (45-46), HØJRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS4B/R
XXL (47-48), VENSTRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS5B/L
XXL (47-48), HØJRE fod	Wound Care Shoe	1 stk	WCS5B/R
XS (37-38), såler	4 aflastningssåler til Wound Care Shoe	1 stk	WC10
S (39-40), såler	4 aflastningssåler til Wound Care Shoe	1 stk	WC11
M (41-42), såler	4 aflastningssåler til Wound Care Shoe	1 stk	WC17
L (43-44), såler	4 aflastningssåler til Wound Care Shoe	1 stk	WC12
XL (45-46), såler	4 aflastningssåler til Wound Care Shoe	1 stk	WC13
XXL (47-48), såler	4 aflastningssåler til Wound Care Shoe	1 stk	WC14