

Cellona Shoe - Bandagesko



Indikationer

- Sår- eller kompressionsbehandling
- Hvor der er behov for plads til bind og bandager

Produktinfo

Cellona Shoe er en skridsikker bandagesko, der kan anvendes ved sår- og kompressionsbehandling, eller hvor der er behov for plads til bind og bandager.

Cellona Shoe kan anvendes som en lukket sko eller som en åben sandal. Velcrobånd og -remme gør det let at tilpasse skoen individuelt, så den sidder godt på foden. Cellona Shoe sikrer støtte ved gangafvikling og øger dermed mobiliteten.

Cellona Shoe er både til børn og voksne. Materialet er resistent overfor fugt og snavs.

Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostropper
- Sæt foden i den åbne sko
- Kontroller foden er korrekt placeret i skoen og at hælen er så langt tilbage i skoen som muligt
- Luk skoen med velcrostropperne
- Foden må ikke sidde for fast og heller ikke for løst i skoen

Vaskeanvisning

- Cellona Shoe kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: Cellona Shoe kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding og derefter tørre i luften
- Cellona Shoe må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiatoren. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

Sortiment

| Størrelse | Indhold | Pakning | Ref. nr. |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Til børn (25-30) | Cellona Shoe | 1 stk | 16471 |
| XS (31-34) | Cellona Shoe | 1 stk | 16472 |
| S (35-38) | Cellona Shoe | 1 stk | 16473 |
| M (39-41) | Cellona Shoe | 1 stk | 16474 |
| L (42-43) | Cellona Shoe | 1 stk | 16475 |
| XL (44-47) | Cellona Shoe | 1 stk | 16476 |