

# Puzzle Insole - Modulopbygget Trykaflastningssål



## Indikationer

- Lilletåmodul (smal)
  - Taylors bunion (lilletå)
  - Jones brud
- Storetåmodul (bred)
  - Arthrodese i MCP og storetåens grundled
  - Austin-, scarf- og akin-osteotomi
  - Closing- og opening-wedge
  - Skrå- og dome-osteotomi
  - Lapidus arthrodese (TMT1-arthrodese)
  - Youngswick osteotomi
- Mellemodul
  - Weil's og/eller Helal's osteotomi I – IV
  - Morton neurom
  - Hammertå korrektur
  - PIP-?/?DIP-arthrodese
  - Ossa metatarsale frakturer II – IV
  - Forkortelsesosteotomi af ossa metatarsalia II – IV (Puzzle-modulet når op til den proksimale ende af metatarsalia II – IV)

## Produktinfo

Puzzle Insole er en modulopbygget trykaflastningssål med udskiftelige elementer. Puzzle Insole består af en hård sort sål og en blødere blå sål. Disse kombineres let og yder aflastning ved for- og midtfods operationer.

Ved at bytte om på modulerne kan patienten opnå den perfekte trykfordeling for hver enkelt indikation. Den 2,4 grader hældning af hælen giver større aflastning af forfoden. I det område af foden, der har brug for aflastning, kan det sorte EVA modul (30 Shore) udskiftes med det blå EVA modul, der er blødere (9 Shore).

Med den modellerbare Puzzle Insole kan man opnå aflastning på op til 55%. Dette er resultatet af en måling sammenlignet med en almindelig sål og en Medical Surgical sko.

Puzzle Insole kan anvendes til følgende af vores behandlersko:

- [Medical Surgical](#)
- [Relief Dual](#)

## Brugervejledning

- Den sorte sål, 30 Shore, er bærermodul. Den blødere blå sål, 9 Shore, anvendes til en indikationsbaseret trykaflastning
- Sæt et blå modulet (smalt, bredt og/?/?eller mellem) ind i den sorte bæresål, det sted trykaflastningen skal virke
- Tag den originale sål ud af skoen
- Læg den tilpassede Puzzle Insole ind i skoen

## Vaskeanvisning

- Sålerne kan vaskes med lunkent vand og sæbe eller rengøres med et desinfektionsmiddel

## Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
Dame, S (34-36,5)	Puzzle Insole	1 stk	PI-WS
Dame, M (37-38,5)	Puzzle Insole	1 stk	PI-WM
Dame, L (39-41)	Puzzle Insole	1 stk	PI-WL
Herre, S (39-41)	Puzzle Insole	1 stk	PI-MS
Herre, M (41,5-43)	Puzzle Insole	1 stk	PI-MM
Herre, L (43,5-45)	Puzzle Insole	1 stk	PI-ML
Herre, XL (45,5-47)	Puzzle Insole	1 stk	PI-MXL