

SlimLine Pediatric - Gipsesko Til Børn



Indikationer

- Brud eller gipsbandager

Produktinfo

Børn er aktive, og det er svært at holde dem i ro i en helingsfase. Gips er ikke kun besværligt, men også svært at tolerere for børn. En simpel, men effektiv ortopædisk sko, kan gøre en verden til forskel for en ung patient med gips.

SlimLine Pediatric er en stabil gipsesko til børn med åben forfod. Skoen har en lille gænge sål, som flytter vægten frem på forfoden. SlimLine Pediatric lukkes nemt med velcrostropper over ankel og forfod, hvilket gør, at den sidder godt fast og er nem at justere.

SlimLine Pediatric har en stødabsorberende sål, der medvirker en sikker gangafvikling.

SlimLine Pediatric er lavet af sort Nylon. Overdelen består af et svedtransporterende EVA/polyestermateriale. Sålen er af termoplastisk gummi (TPR) med støddæmpende virkning. Sålens profil letter afslutningen.

SlimLine Pediatric eksisterer i farverne pink/blå samt blå.

Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostropper
- Sæt foden i den åbne sko
- Kontroller, at foden er korrekt placeret i skoen og at hælen er så langt tilbage i skoen som muligt
- Luk skoen med velcrostropperne
- Foden må ikke sidde for fast og heller ikke for løst i skoen

Vaskeanvisning

- SlimLine Pediatric kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: SlimLine Pediatric kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding
- SlimLine Pediatric må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiator. Skoen skal tørre ved stuetemperatur

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
Small (27-29), PINK / BLÅ	SlimLine Pediatric	1 stk	SLP-1P
Small (27-29), BLÅ	SlimLine Pediatric	1 stk	SLP-1N
Medium (30-32), PINK / BLÅ	SlimLine Pediatric	1 stk	SLP-2P
Medium (30-32), BLÅ	SlimLine Pediatric	1 stk	SLP-2N
Large (33-34), PINK / BLÅ	SlimLine Pediatric	1 stk	SLP-3P
Large (33-34), BLÅ	SlimLine Pediatric	1 stk	SLP-3N