

Cast Boot Pediatric - Gipsesko Til Små Børn



Indikationer

- Brud eller gipsbandager

Produktinfo

Gips er ikke kun besværligt, men også svært at tolerer for børn. En simpel, men effektiv ortopædisk sko, kan gøre en verden til forskel for en ung patient med gips.

Cast Boot Pediatric er en gipsesko til helt små børn. Cast Boot Pediatric er åben i forfoden, den har en lille gænge sål, som er helt stiv og dermed sikrer, at foden forbliver i den rigtige position, og vægten flyttes frem på forfoden.

Cast Boot Pediatric lukkes nemt med velcrostrapper over anklen og forfoden, så den sidder godt fast på foden og er nem at justere og tilpasse.

Brugervejledning

- Åbn skoens velcrostrapper
- Sæt foden i den åbne sko
- Kontroller, at foden er korrekt placeret i skoen og om hælen er så langt tilbage i skoen som muligt
- Luk skoen med velcrostrapperne ved hælen og over fodryggen
- Foden må ikke sidde for fast og heller ikke for løst i skoen
- Velcrobåndene kan afkortes / klippes af efter behov

Vaskeanvisning

- Cast Boot Pediatric kan tørres af med en fugtig klud, hvis den er let snavset eller renses med en blød børste
- Håndvask: Cast Boot Pediatrice kan vaskes i hånden med koldt vand og en let sæbeblanding
- Cast Boot Pediatric må ikke tørres i en tørretumbler og heller ikke på radiator. Skoen skal tørre ved stuetemperatur.

Sortiment

Størrelse	Indhold	Pakning	Ref. nr.
S (op til str. 20), Lyseblå m. farvede cirkler	Cast Boot Pediatric	1 stk	CB-PED1
M (21-22), Lyseblå m. farvede cirkler	Cast Boot Pediatric	1 stk	CB-PED2